

LAK SZCZELINOWY

KOMPOZYT TYPU FLOW




ARKONA

LAK SZCZELINOWY jest przeziernym, nanohybrydowym kompozytem do uszczelniania bruzd, utwardzanym światłem widzialnym.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1.

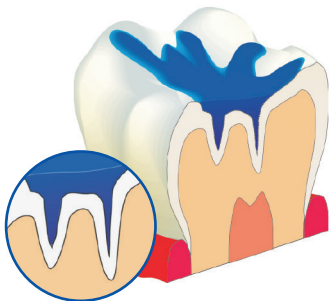


- Zaaplikować Wytrawiacz na powierzchnie przeznaczone do lakowania, zwracając szczególną uwagę na wprowadzenie go również na dno bruzdy; pozostawić na 20-30 s;
- Wytrawiacz spłukać dokładnie silnym strumieniem wody, a następnie starannie osuszyć powierzchnię zęba.

Jeśli wygląd wytrawionego szkliwa nie jest kredowo-biały należy powtórzyć proces wytrawiania. Jeśli wystąpi nawet minimalne zanieczyszczenie wytrawianego miejsca, należy wytrawić ponownie przez czas ok. 10 s.

2.

Lakowanie


- Dokładnie rozprowadzić LAK SZCZELINOWY na wytrawionej powierzchni zęba
- Naświetlać zgodnie z tabelą polimeryzacji

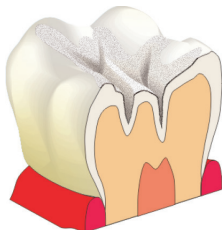

A. Wytrawiony ząb



B. Ząb częściowo pokryty LAKIEM

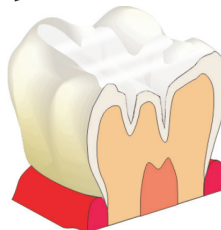

C. Zalakowany ząb



WSKAZANIA DO STOSOWANIA

LAK SZCZELINOWY przeznaczony jest do:

- uszczelniania bruzd w zębach stałych i mlecznych
- zabezpieczania przed próchnicą wszystkich naturalnych szczelin, bruzd i otworów znajdujących się na powierzchniach zębów stałych i mlecznych.

TABELA POLIMERYZACJI

Lampa	5 s	10 s
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	2,0 mm	3,0 mm
LED (>800 mW/cm ²)	3,0 mm	4,0 mm

SKŁAD

Mieszanka żywic dimetakrylanowych (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), szkło Ba-Al-B-Si, krzemionka pirogeniczna, układ fotoinicjujący, stabilizatory. Zawartość napelniaczy: 20 % wag.

LAK SZCZELINOWY jest utwardzany światłem widzialnym z zakresu 400-500 nm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu niespolimeryzowanego materiału ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem, podając informacje o produkcie.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zaprzestać stosowania produktu.

W przypadku pokłknięcia lub zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE

Nie stosować w przypadku, gdy niemożliwa jest całkowita izolacja powierzchni od śliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogą zaburzać polimeryzację laku, powodując spadek wytrzymałości mechanicznej i zmniejszenie efektywności uszczelnienia.

Należy zadbać o prawidłowe naświetlenie lampą polimeryzacyjną. Kompozyt niecałkowicie spolimeryzowany może być alergizujący dla pacjenta.

Nie stosować produktu w bezpośrednim kontakcie z materiałami zawierającymi eugenol.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu należy usunąć zanieczyszczoną warstwę materiału.

W razie zanieczyszczenia lub mechanicznego uszkodzenia warstwy już spolimeryzowanej, należy delikatnie wytrzeć jej powierzchnię i ponownie pokryć warstwą laku. Naświetlać wg tabeli polimeryzacji.

W przypadku niepełnej polimeryzacji usunąć nieprawidłowo spolimeryzowaną warstwę i położyć następną, naświetlając ją prawidłowo.

PRZECZYSZCZANIE

Przechowywać w temperaturze 3-28°C. W przypadku przechowywania w obniżonej temperaturze, przed powtórным użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Celem uniknięcia przypadkowej polimeryzacji LAKU SZCZELINOWEGO w aplikatorze, zawsze cofać tłoczek strzykawki po użyciu.

PRZECIWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA

Nie stosować kompozytu LAK SZCZELINOWY u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Chronić przed światłem.

Chronić przed przegrzaniem.

Używać zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają potwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

Data ostatniej aktualizacji ulotki 25.01.2018 r.