

Návod k použití Profylaktický písek Monoflow

Profylaktický písek Monoflow je přípravek, který účinně odstraňuje z povrchu zubu nečistoty způsobené plakem, subgingiválním zubním kamenem, kávou, čajem a nikotinovými usazeninami. Přípravek Monoflow v kombinaci s vodou a stlačeným vzduchem vytváří proud, který abrazivně čistí povrch skloviny. Preventivní pískování je velmi účinnou metodou k odstranění zabarvení a plaku, a bělení těžko přístupných povrchů, aby se předešlo periodontálním onemocněním. Abrazivní účinky písku jsou pro strukturu zubu bezpečné. Po ošetření jsou povrchy zubu stejnoměrně čisté a bez přítomnosti bakterií díky hydrogenuhličitanu sodnému (SoBiCA), který má antibakteriální a bělicí účinek.

Profylaktický písek Monoflow se používá ve všech typech pískovacích přístrojů. Před naplněním pískovací nádoby písek MonoFlow protřepejte. Poté nasypejte písek do pískovací nádoby v takovém množství, aby nevyplňoval více než 1/3 objemu a nezakrýval vstupní otvory v tryskách. V nádobce se mísí voda, vzduch a písek.

Hlavní technické parametry směsi písku a vody

Tlak vody 0,0-3,0 bar (0-3000 hPa)

Tlak vzduchu 2,3-3,2 bar (2300-3200 hPa)

Provozní spotřeba vody ≥ 30 ml/min

Abrazivní opotřebení během provozu – 2-3
g/min

Čištění povrchu zubu by se mělo provádět ze vzdálenosti 3-5 mm od povrchu. Proud profylaktického písku by měl dopadat na povrch zubu pod úhlem 30-60 stupňů. Abrazivní proud by měl směřovat výhradně na povrch zubu, nikdy ne na měkké tkáně. Při použití profylaktického písku je nutné odsávací zařízení k odstranění směsi písku a vody z úst pacienta a osobní ochranné prostředky: gumové rukavice, masky, brýle a ochranný oděv.

Složení přípravku MonoFlow:

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO_3 Koncentrace v produktu 97%

Použití – abrazivní činidlo, jemné částice čistící povrch zubu.

Sacharát sodný Koncentrace v produktu 3%

Použití – ochucovadlo, sladká příchuť.

Aromatická látka Koncentrace v produktu 1%

Použití – vonná složka, máta, citron, rybíz, malina, pomeranč

Hydrofobní oxid křemičitý Koncentrace v produktu 0,6%

Použití – hydrofilní prvek zabraňuje absorpci vlhkosti a hrudkování písku.

Produkt je určen k použití zubními lékaři a dentálními hygienistkami.

Potenciální účinky na zdraví – Při použití v souladu s návodem nehrozí žádné zvláštní riziko. Při zasažení očí ihned oči vypláchněte tekoucí vodou a kontaktujte oftalmologa. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v původním balení. Po každém použití produkt pečlivě uzavřete. Produkt musí být uchováván těsně uzavřený a na suchém místě. Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Neexistují žádné zvláštní předpisy v souladu s nařízeními pro bezpečnost a hygienu. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení pokožky ihned pokožku omyjte tekoucí vodou a mýdlem.

Amident Jacek Kałużny 00-162 Warszawa, Dzielna 5/1a

Telefon: 22 634 35 96 biuro@monoflow.pl

www.monoflow.pl

AMIDENT
Jacek Kałużny
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 5/1a
tel. 022 634 35 96
REGON: 012655113, NIP: 523-162-04-05

Jacek Kałużny