

PAROSIN

ZESTAW DO PŁUKANIA KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH

Preparat w postaci płynu ze strzykawkowym dozownikiem do płukania, przemywania i oczyszczania kieszonek dziąsłowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć zatyczkę i w jej miejsce założyć zagiętą końcówkę. Wprowadzić ostrożnie końcówkę możliwie jak najgłębiej do kieszonki dziąsłowej. Powoli naciskając tłoczek przemyć miejsce zapalne. Płukać aż do momentu, gdy wszystkie stałe zanieczyszczenia wypłyną z kieszonki. Po zakończonym przemywaniu polecić pacjentowi przepłukanie ust wodą.

Dla zmniejszenia dolegliwości bólowych podczas płukania, lekko podgrzać preparat przed użyciem umieszczając go np. w cieplej wodzie.

ZASTOSOWANIE

- kieszonki dziąsłowe
- okolice wypełnień klasy II
- okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem, zwłaszcza ósemek
- po usuwaniu kamienia nazębnego
- obrzęki dziąseł pod protezami i w okolicy zębów podtrzymujących klamry
- pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony
- przed ekstrakcją, w kieszonekach dziąsłowych sąsiadujących z zębem przeznaczonym do usunięcia
- w okolicy aparatów ortodontycznych

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.



ARKONA

INFORMACJE DODATKOWE

Preparat dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych. Preparatu Parosin nie należy stosować do płukania kanałów korzeniowych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepowołanych.

Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz u kobiet w ciąży. Nie powoduje uzależnień ani powikłań. Może być stosowany według indywidualnych potrzeb.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością wody i poradzić się specjalisty.


GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają stwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.


SKŁAD

1. Woda ozonowana
2. Nanokoloid srebra
3. Azotan sodu
4. Aromaty
5. Kwas ortofosforowy
6. Kwas mlekowy


1. Zapalenie kieszonek dziąsłowych

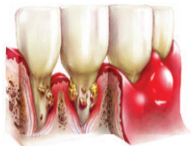


2. Okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem (zwłaszcza ósemek)

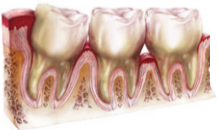

3. Pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony

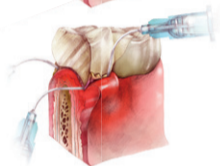

4. Okolice wypełnień klasy II

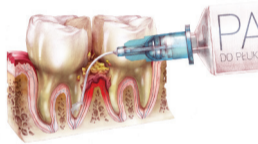

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.05.2022

CE
1639


ARKONA

 **ARKONA**
ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutow 99C, 21-025 Niemce, Polska, EU
www.arkonadent.com