

SILOFF

85 ml

SILOFF jest przeznaczony tylko do zastosowań zewnętrznych. SILOFF może być stosowany na silikony addycyjne i kondensacyjne.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

1. Oczyszczyć i osuszyć przeznaczoną do zaizolowania powierzchnię.
2. Delikatnie wstrząsnąć produkt przed użyciem.
3. Spryskać przeznaczoną do zaizolowania powierzchnię z odległości ok. 15 cm.
4. Pozostawić na około 20 sekund aż do wyschnięcia powierzchni.

W celu przyspieszenia wysychania można użyć nawiewu. Wyschnięty SILOFF tworzy na zaizolowanej powierzchni warstwę, która pozwala na bezpieczny kontakt z innymi materiałami. Produkt zmywa się przy pomocy wody.

INFORMACJE DODATKOWE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wdychać. Niewłaściwie użyty produkt może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Nie rozpylać w pobliżu oczu. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą i dobrze spłukać.

OSTRZEŻENIA

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych. Chronić przed przegrzaniem. Nie zamrażać. Używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać po upływie terminu ważności. Produkt niebezpieczny dla środowiska.

UWAGA!



Pojemnik pod ciśnieniem.

Produkt łatwopalny.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed światłem słonecznym oraz temperaturą powyżej 50°C. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

Data aktualizacji etykiety: 27.01.2022